

TECAR **DERMATOFONCTIONNELLE**

Une seule technologie, **des possibilités d'application infinies**



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE



QUI SOMMES-NOUS ?

GLOBUS est une entreprise leader mondial dans la production d'équipements électromédicaux portables depuis plus de 30 ans.

Notre large gamme comprend des lignes complètes de produits pour la **PHYSIOTHÉRAPIE**, le **SPORT**, la **VÉTÉRINAIRE** et l'**ESTHÉTIQUE**.

NOSTRE MISSION

La mission de **GLOBUS** est de contribuer à la promotion de la santé et du bien-être dans le monde en fournissant des produits de haute qualité aux professionnels de la rééducation et de la physiothérapie, mais aussi aux utilisateurs particuliers, qui souhaitent améliorer leur qualité de vie en toute sécurité, en bénéficiant des technologies les plus modernes disponibles aujourd'hui dans le marché.

NOTRE HISTOIRE

GLOBUS a été fondée en 1984 à Codognè, dans la Province de Trévise (Italie), par son Président-Directeur général, Pierpaolo Lucchetta, bronze de volley-ball aux Jeux Olympiques de Los Angeles et professionnel qui a gagné de nombreux prix jusqu'à 1994.

L'expérience d'athlète de haut niveau de son président a été fondamentale chez **GLOBUS** pour la conception et le développement de plusieurs lignes de produits visant la récupération après accident, le renforcement musculaire et l'amélioration générale des prestations sportives. Afin de développer des produits sûrs, efficaces et hautement technologiques, **GLOBUS** se sert de nombreuses collaborations avec des universités et des instituts de recherche du monde entier et respecte scrupuleusement les directives scientifiques les plus rigoureuses.

Aujourd'hui **GLOBUS** est une entreprise leader dans le secteur de la rééducation et de la physiothérapie et exporte en plus de 50 pays du monde. Les produits **GLOBUS** sont certifiés UNI CEI EN ISO 13485:2016 et CE par le Système de Garantie de la Qualité en Europe, FDA aux États-Unis et IEx au Brésil.

Ligne **TECAR GLOBUS**

Avec les appareils de la ligne **TECAR GLOBUS** vous pouvez effectuer tout type de traitement dermatofonctionnel et travailler sur plusieurs régions à tous les niveaux de manière **efficace, sûre et rapide.**

Le guide des **traitements** avec **atlas**, les **protocoles pré-insérés**, les **fonctions spéciales** et la large gamme d'accessoires développées spécifiquement pour les différents domaines d'application, vous garantiront de nouvelles possibilités et **des résultats toujours satisfaisants.**

RÉACTIVE LE MÉTABOLISME CELLULAIRE

La **TECARTERAPIA** agit avec une efficacité extraordinaire en profondeur sur le métabolisme cellulaire et vous permet d'obtenir d'incroyable résultats sur les dysfonctionnements, y compris chroniques, comme aucune autre technologie n'est capable de le faire.

Grâce à la polyvalence de nos appareils, il sera possible d'intervenir, par exemple, sur la réactivation tissulaire, sur la cellulite sclérotique ou encore sur les œdèmes et les hématomes profonds avec des résultats surprenant dès le premier traitement.

- DYSFONCTIONNEMENT DE LA CIRCULATION VEINEUSE ET LYMPHATIQUE
- CELLULITE ŒDÉMATEUSE, FIBROTIQUE ET SCLÉROTIQUE
- LAXITÉ CUTANÉE ET HYPOTONIE
- ADIPOSITÉS LOCALISÉES
- RÉABSORPTION DES OEDÈMES ET DES HÉMATOMES



DYSFONCTIONNEMENT DE LA CIRCULATION VEINEUSE ET LYMPHATIQUE



Avec la **TÉCARTHÉRAPIE** il est possible **d'ouvrir les stations lymphatiques** et de **drainer les accumulations de liquides interstitiels**, en favorisant la **résorption des gonflements** des membres et le rééquilibrage du système veineux et lymphatique.

CELLULITE ŒDÉMATEUSE, FIBROTIQUE ET SCLÉROTIQUE

Traitement en mode Résistif avec les **têtes spéciales (KIT FASCIA TOOLS)** pour la **résolution des nodules fibreux** et le **remodelage du tissu conjonctif**.



STIMULE LA SANTÉ DE LA PEAU


Avec les appareils **TECAR GLOBUS** vous pouvez également stimuler la production de collagène et d'élastine dans la peau d'une manière exceptionnellement précise et contrôlée, en stimulant les processus naturels de régénération des tissus et en diminuant de manière exponentielle les temps de récupération et de guérison, entre autres, des cicatrices post-chirurgicales et chéloïdes.

- TRAITEMENTS VISAGE ANTI-ÂGE DERMATOFONCTIONNELS
- STIMULATION DE LA PRODUCTION DE COLLAGÈNE ET D'ÉLASTINE
- PRÉPARATION PRÉ-CHIRURGICALE
- ŒDÈME ET DOULEUR APRÈS CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ET RECONSTRUCTIVE
- CHELOÏDES ET CICATRICES HYPERTROPHIQUES
- ULCÈRES ET BRÛLURES




STIMULATION DE LA PRODUCTION DE COLLAGÈNE ET D'ÉLASTINE

PEAU VIEILLIE

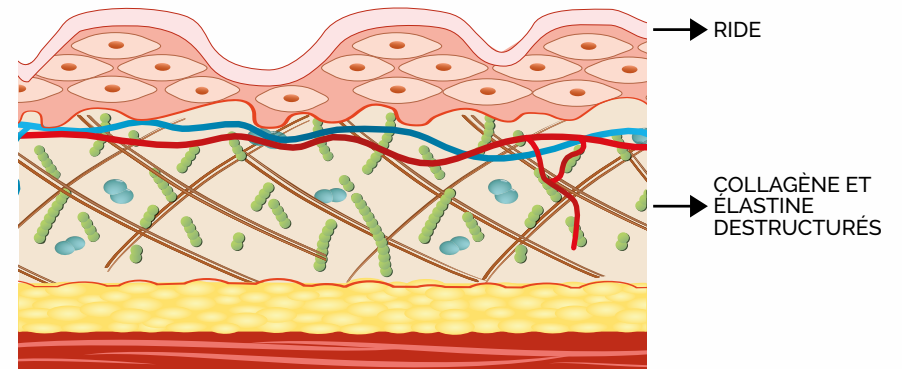

PEAU RÉGÉNÉRÉE AVEC TECAR GLOBUS

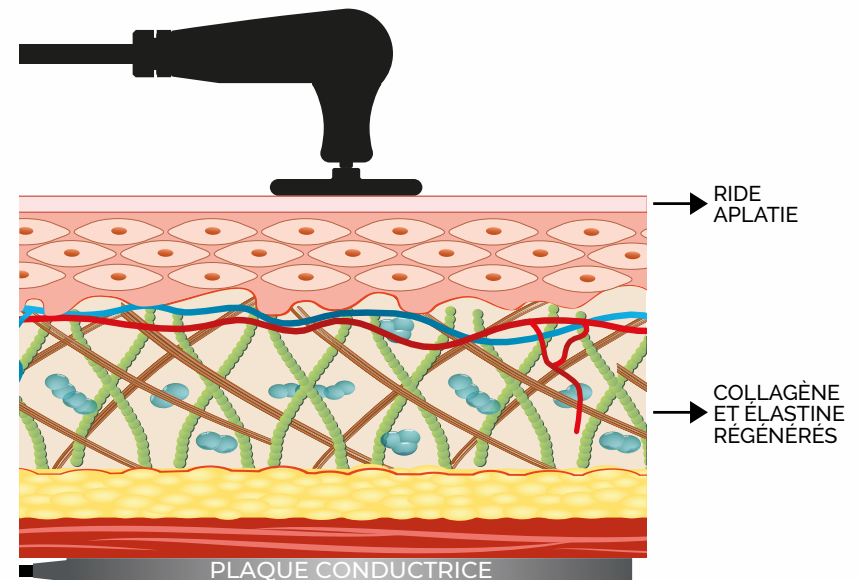

CHELOÏDES ET CICATRICES HYPERTROPHIQUES



Les chéloïdes sont des lésions fibrotiques cutanées qui résultent d'une altération du processus normal de cicatrisation d'une plaie cutanée.

Le traitement combiné avec **TECARTHÉRAPIE** et **FASCIA TOOLS** permet à la fois d'en prévenir la formation et d'agir efficacement sur le tissu fibrotique, pour des résultats à la fois esthétiques et fonctionnels.

RÉTABLIR

LE CONFORT INTIME

La précision de nos appareils **TÉCAR** nous permet d'agir efficacement et en toute sécurité et confort même en résolvant des problèmes strictement liés aux régions les plus intimes.

Des accessoires spécifiques ont été spécialement conçus pour les traitements, internes et externes, qui améliorent la santé du plancher pelvien, chez l'homme et la femme, et rétablissent le tonus et l'élasticité du vagin, tout en garantissant d'excellents résultats en cas de cicatrices après-accouchement.

- AMÉLIORATION DU TONUS DU PLANCHER PELVIEN
- CICATRICES POST-ACCOUCHEMENT
- DIASTASE ABDOMINALE
- SYNDROMES MYOFASCIAUX ENDOPELVIQUES
- RÉÉDUCATION PÉRINÉALE HOMME ET FEMME
- LAXITÉ VAGINALE

AMÉLIORATION DU TONUS DU PLANCHER PELVIEN

Le **KIT INTIMA** a été conçu pour effectuer le traitement endopelvien en toute sécurité.

Le mode capacitif permet une action régénératrice profonde des muqueuses avec un confort maximal.

En combinaison avec les têtes traditionnelles et le kit **MAINS LIBRES**, il offre un système complet pour augmenter le tonus et pour tous les dysfonctionnements du plancher pelvien.



CICATRICES POST-ACCOUCHEMENT



La grossesse laisse une transformation physique et émotionnelle complète sur le corps de la mère et parfois quelques signes, par exemple des cicatrices externes ou internes qui peuvent causer des douleurs et des dysfonctionnements fonctionnels sévères même après un certain temps. La **TÉCARTHÉRAPIE GLOBUS** a des fonctions et des électrodes spéciales pour la rééducation de tous ces dysfonctionnements.

DIASTASE ABDOMINALE



Application de la méthode « **MAINS LIBRES** » pour le traitement de la diastase abdominale.

Avec les électrodes adhésives, il y a un transfert d'énergie profond qui stimule l'activation et la synthèse de néo-collagène dans la zone de diastase. En même temps, le thérapeute peut effectuer la rééducation respiratoires ou des muscles abdominaux.

LIGNE PROFESSIONNELLE DIACARE

DIACARE 7000

- Protocoles médicaux
- Puissance Nominale (NP) : 350W $\pm$ 10%
- Écran : 7" écran tactile couleur
- Fréquence d'émission : 300kHz - 400kHz - 448kHz - 470kHz
700kHz - 1000kHz - 1200kHz, $\pm$ 10%
- Alimentation secteur : - 230V AC, 50-60Hz, 3,7A
- 115V AC, 50-60Hz, 7,4A



DIACARE 5000

- Protocoles médicaux
- Puissance Nominale (NP) : 180W $\pm$ 10%
- Écran : 4,3" écran tactile couleur
- Fréquence d'émission : 300kHz - 400kHz - 448kHz
470kHz - 700kHz - 1000kHz, $\pm$ 10%
- Alimentation secteur : 100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A



LIGNE PROFESSIONNELLE TECAR BEAUTY MED

TECAR BEAUTY 7000 MED

- Protocoles esthétique et médicaux
- Puissance Nominale (NP) : 350W $\pm$ 10%
- Écran : 7" écran tactile couleur
- Fréquence d'émission : 300kHz - 400kHz - 448kHz - 470kHz
700kHz - 1000kHz - 1200kHz, $\pm$ 10%
- Alimentation secteur : - 230V AC, 50-60Hz, 3,7A
- 115V AC, 50-60Hz, 7,4A



TECAR BEAUTY 6000 MED

- Protocoles esthétique et médicaux
- Puissance Nominale (NP) : 180W $\pm$ 10%
- Écran : 4,3" écran tactile couleur
- fréquence d'émission : 300kHz - 400kHz - 448kHz
470kHz - 700kHz - 1000kHz, $\pm$ 10%
- Alimentation secteur : 100-240V AC, 50-60Hz, 1,8A



KIT ÉLECTRODES CONVEXES CAPACITIVES ET RÉSISTIVES



KIT ÉLECTRODES CAPACITIVES CONCAVES



PIÈCES À MAIN NEUTRES ACTIVES ET BIPOLAIRES



KIT COUVERCLES D'ÉLECTRODES



DYNAMIC HANDLE



KIT INTIME



KIT MAINS LIBRES PLUS

POUR DIACARE 7000 ET TECAR BEAUTY 7000 MED



POUR DIACARE 5000 ET TECAR BEAUTY 6000 MED



PLAQUES NEUTRES - KIT FASCIA OUTILS - PIÈCES À MAIN ET ÉLECTRODES



CHARIOTS POUR DISPOSITIFS





Pour les détails sur les caractéristiques techniques de nos dispositifs

visitez le site
globuscorporation.com

ou scannez le **Code QR**



DOMINO SRL

Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALIE



(+39) 0438 7933

Matériel informatif réservé aux opérateurs du secteur.

Les images et les caractéristiques techniques qui se trouvent dans ce dépliant ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées à tout moment par le producteur, sans obligation de préavis.
Pour plus d'informations sur nos produits et traitements, pour regarder les vidéos de nos produits et pour connaître nos revendeurs, visitez notre site.